

# HEPRO<sup>+</sup>.CH

## HEPPY EYE

Station de lavage oculaire  
Emballage : Bouteille de 500 ml  
N° d'article : 023 00 03



### Caractéristiques

- Assure un rinçage oculaire rapide et efficace
- Équipé de pictogrammes d'application
- Pour des postes de travail sans poussière ni saleté

### Utilisation



1. Tournez le bouchon vert de la station de lavage oculaire de 360°.
2. Tenez la station de lavage oculaire maintenant ouverte contre l'œil concerné.
3. La station de lavage oculaire est conçue pour un usage unique.  
Jetez-la après utilisation afin d'éviter tout risque d'infection.

### Données techniques

Matériau de la bouteille	Polyéthylène sans additifs
Contenu de la bouteille	505 - 512 ml
Fond de bouteille ∅	78 mm
Hauteur de la bouteille	183 mm

### Informations

Stockage : conserver le produit à 5°C minimum et à 40°C maximum.  
Durée de conservation : 42 mois à partir de la date de fabrication

Ce document est exclusivement destiné à un usage commercial. Il est fourni à titre d'information sans engagement et est basé sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. L'utilisateur a l'obligation de vérifier lui-même si les produits conviennent aux applications et aux fins prévues. Les informations contenues dans cette fiche ne constituent pas une garantie de qualité ou de durabilité des marchandises que nous livrons. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans des limites raisonnables. En outre, il convient également de tenir compte de la fiche de données de sécurité actuelle de l'UE.