

# HEPRO<sup>+</sup>.CH

## HEPPY EYE


Stazione di lavaggio oculare  
Imballaggio: Bottiglia da 500 ml  
Numero articolo: 023 00 03



### Caratteristiche

- Assicura un risciacquo rapido ed efficace degli occhi
- Dotato di pittogrammi applicativi
- Per postazioni di lavoro prive di polvere e sporco

### Impiego

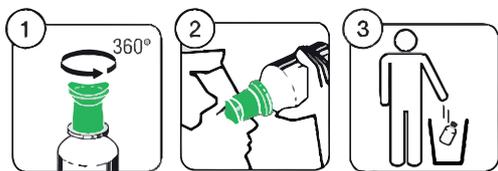

1. Ruotare il tappo verde della stazione di lavaggio oculare di 360°.
2. Tenere la stazione di lavaggio oculare aperta contro l'occhio colpito.
3. La stazione di lavaggio oculare è progettata per essere utilizzata una sola volta. Gettarlo via dopo l'uso per evitare qualsiasi rischio di infezione.

### Dati tecnici

Materiale della bottiglia	Polietilene senza additivi
Contenuto della bottiglia	505 - 512 ml
Fondo della bottiglia ∅	78 mm
Altezza della bottiglia	183 mm

### Avvertenze

Conservazione: conservare il prodotto a una temperatura minima di 5°C e massima di 40°C.  
Durata di conservazione: 42 mesi dalla data di produzione.

Questo documento è destinato esclusivamente all'uso commerciale. Viene fornito senza impegno e si basa sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. È responsabilità dell'utente verificare se i prodotti sono adatti alle applicazioni e agli scopi previsti. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica non costituiscono una garanzia della qualità o della durata dei prodotti da noi forniti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche entro limiti ragionevoli. Si consiglia di prendere in considerazione anche l'attuale scheda di sicurezza dell'UE.